



Listado de Precios de Kenza Group

Maquinas del Catalogo:

IPL (Luz Pulsada Intensa).	Paginas 2-4
E-Light (IPL + Radiofrecuencia)	Paginas 5-8
Radiofrecuencia	Paginas 9-14
Cavitacion	Paginas 15-20
IPL + Radiofrecuencia + Cavitacion	Página 21

INTRODUCCION SOBRE LA LINEA EVOLUTION:

La línea de equipos Evolution para luz pulsada (IPL), Radio Frecuencia y Elight poseen una avanzada tecnología, incorporando los últimos avances en sistemas de refrigeración, sistemas multipulso y demás ventajas tecnológicas que permiten ofrecer un servicio superior.

La gama de maquinaria ofrecida se vende directo de fabrica, no trabajamos a través de distribuidores locales. Cabe destacar que los equipos IPL permiten tratar todos los foto tipos de pieles, a diferencia de los equipos laser, y además sirven para realizar otros tratamientos como por ejemplo rejuvenecimiento facial, pigmentación, acné, lesiones vasculares y reafirmación de busto. Los equipos Elight, además de todo lo anterior, ofrecen la posibilidad de tratar celulitis, a través de la función de radio frecuencia, y depilar pelos con canas y pelo rubio.

Equipo IPL: Evolution 0.25

Precio: \$6,000 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Tratamiento principal:

- a. Retiro permanente rápido del pelo
- b. Rejuvenecimiento de la piel: aligere la pigmentación, reduzca la arruga, encoja los poros, aumente la elasticidad de pieles, y restaure el lustre de las pieles, el retiro vascular del etc.
- c. Lesión vascular
- d. Elevación del pecho
- e. Retiro del acné

Especificación

1. Característica principal: Equipo portable del IPL (1 & del mano-pedazo del tratamiento del IPL; 6.0" Pantalla dual)
2. Punto-tamaño del zafiro: 15*35m m (estándar) . Punto grande.
3. Longitud de onda del filtro: 420/560/640~1200nm (estándar) 480/585/690/755~1200nm (opcional)
4. Energía ligera del IPL: 10~50J/cm2
5. Duración del pulso: 2~20ms
6. Secuencia del pulso: 1~5 pulsos
7. Sistema de enfriamiento: Circulación de aire , refrigeración por agua y enfriamiento por semiconductor
8. Pantalla dual del LCD del color 6
9. Energía: 600W
10. Peso: 16 KG. Con el paquete (caja de aluminio), 26kg.
11. Dimensiones: 450 * 350 * 290 mm.



Equipo IPL: Evolution 3

Precio: \$8,000 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Gama de espectro: 420-1200nm; 510-1200nm; 560-1200nm; 640-1200nm

Opción: 585-1200nm; 690-1200nm; 755-1200nm, 950nm

Energía: 100W

Densidad de energía: 10-50J/cm²

Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5

Interrupción del pulso: 5-60ms

Anchura de pulso: 2-20ms

Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz

Entrega: Acoplador del zafiro Punto ligero: 8 × 40m m,

Punto grande: 15x35m m, 15x50m m

Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión por semiconductor

Embalaje de aluminio N.W: 31kg G.W: caja de 42kg

Dimension: 59*45*47. Dimension con caja de Aluminio: 47*37*34/

Temperatura de enfriamiento: -4 - 0°C



Equipo IPL: Evolution 7

Precio: \$10,000 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Gama de espectro: 520-1200nm; 620-1200nm

Opciones: 420-1200nm; 560-1200nm; 690-1200nm; 755-1200nm

Big Spot: 430nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640nm, 690nm

Tres opciones;

1, dos handpieces ambos con el filtro fijo;

2, dos handpieces ambos con los filtros cambiables;

3, un handpiece con el filtro fijo, un handpiece con los filtros cambiables;

Energía: 1200W

Densidad de energía: 10-50J/cm²

Secuencia del pulso: pulso 1.2.3.4.5

Interrupción del pulso: 5-60ms

Anchura de pulso: 2-20ms

Frecuencia de la repetición: 0.3-1Hz

Entrega: Acoplador del zafiro

Punto de luz: 8 × 40mm

Punto grande: 15x35mm, 15x50mm

Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión y enfriamiento por semiconductor

Temperatura de enfriamiento: -4 - 0°C

Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110v/60Hz

Peso: 75kgs con el embalaje; 50kgs sin el embalaje



Equipo E-Light: Evolution 17

Precio: \$12,000 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Dos cabezas de tratamiento: IPL y Skin Rejuvenator (IPL + RF). Esta maquina no trabaja con filtros intercambiables, se ajustan los parametros desde la pantalla. En modo del RF, solo se necesita solamente ajuste la energía del IPL a 0. Este manipulador cuenta con dos electrodos de metal a ambos lados del cristal para el tratamiento de RF.

Especificación

Remoción de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas. Promueve el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel. Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la epidermis o pigmento y trata el telangiectasis
 Wavelength ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm
 Punto de luz : 8*40m
 Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel
 Energía del IPL: 15-50 J/cm²
 Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square cm Anchura de pulso: 0.5-10ms
 Duración del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)
 Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus
 Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110V/60Hz
 Dimensiones: 43*68*51cm. Peso neto: 36Kg.
 Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas.
 Código de aduana: 8543709990
 Refrigeración: -5 grados + 3 grados. Por circulación de agua, semiconductor y aire forzado. Potencia: 1200W



Equipo E-Light: Evolution 17.5

Precio: \$12,000 dolares sin carrito o \$13,000 dolares con carrito (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Descripción

Combina tres tecnologías avanzadas: Radiofrecuencia bipolar o monopolar (a elección)+ IPL + Elight. La energía de la radiofrecuencia puede alcanzar el medio y la capa profunda de la piel, y una energía más baja es aplicada durante el tratamiento del IPL. La sensación incómoda durante el tratamiento del IPL será disminuida perceptiblemente y un mejor resultado puede ser así esperado. Además, el sistema de enfriamiento implicado en E-Light puede también facilitar la sensación incómoda. Así pues, el tratamiento de la E-Light puede conseguir buen resultado en el pelo suave o fino para disminuir el riesgo causado por el tratamiento tradicional del IPL. El Hand Piece Bipolar es mejor para Body Shapping, mientras el Hand Piece Monopolar los es para la Celulitis y el tratamiento facial.



MAQUINAS E-LIGHT

Equipo E-Light: Evolution 17.5

Precio: \$12,000 dolares sin carrito o \$13,000 dolares con carrito
(con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Especificación

Remoción de vello de todo color y tipo de piel. Rejuvenecimiento facial-lifting/alisa arrugas.
Promueve el colágeno, Consolida la elasticidad de la piel.
Tratamiento del acné. Encoge los poros gruesos. Trata manchas profundas, manchas de la epidermis o pigmento y trata el telangiectasis
Wavelength ajustable: 530-1200nm 610-1200 nm
Punto de luz : 8*40m
Energía del RF: 5-50W. La energía del RF puede penetrar a una profundidad de 15mm en la piel
Energía del IPL: 15-50 J/cm²
Intervalo del tiro: 1-5s Sistema rector ligero: Zafiro puro Densidad de energía del IPL: 1-50J/square cm Anchura de pulso: 0.5-10ms
Duración del pulso: 1-50ms. Intervalo del pulso: 1-5s. Cantidad del pulso: 1-15 pulsos (ajustable)
Lámpara: Lámpara de xenón del noblelight de Alemania Heraeus
Fuente de alimentación: 220V/50Hz o 110V/60Hz
Dimensiones: 43*68*51cm. Peso neto: 36Kg.
Pantalla táctil a color de 8.4 pulgadas.
Código de aduana: 8543709990
Refrigeración: -5 grados + 3 grados por circulación de agua, semiconductor y aire forzado.
Potencia: 1200W



MAQUINAS E-LIGHT

Equipo E-Light: Evolution 18

Precio: \$16,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Especificación técnica

Sistema de tratamiento de E-LIGHT de 3 cabezas
 Manipulos: Cabeza de tratamiento IPL, cabeza bipolar de tratamiento RF (frecuencia de radio) y cabeza de tratamiento de la E-Light (IPL+RF)
 Fuente de luz: Luz pulsada intensa
 Longitud de onda: 420/510/560/640~1200nm (estándar de IPL+RF)
 Longitud de onda opcional: 640/690/755-1200nm
 Tamaño de punto: 8 x 40 mm² (IPL), 12 x 30 mm² (IPL+RF); 12x45 mm² (IPL+RF); Φ 15 (RF), Φ 32 (RF)
 Big Spot para filtros de 430nm,530nm,560nm,590nm,640nm,690nm
 Intermitencia del pulso: 5-60ms
 Duración del pulso: 2~15ms
 Secuencia del pulso: 1~15 pulsos (ajustables)
 Sistema de enfriamiento: por aire forzado; circulación del gua y enfriamiento por semiconductor.
 Energía del IPL: 10~50 J/cm²
 Ptencia del IPL: Wats 1800
 Energía del RF: 1~10MHz (bipolar)
 Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V/60Hz
 Puerto del USB: Software del LCD de la mejora
 Peso: 44kgs



MAQUINAS E-LIGHT

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



¿Qué es radiofrecuencia?

Son radiaciones electromagnéticas que oscilan de forma simultánea en el campo eléctrico y magnético. Los aparatos de radiofrecuencia con aplicación estética generan un campo eléctrico dual, provocando un movimiento de rotación de las moléculas que genera calor capaz de llegar a profundidades de hasta 20 mm., llegando así al tejido adiposo y la celulitis.

Con el paso del tiempo nuestra piel va transformándose, va adquiriendo un aspecto más irregular, se va poblando de arrugas y celulitis. Pierde firmeza ya que las fibras colágenas y elásticas van disminuyendo en cantidad y la piel pierde de esta manera su maya de sostén.

Uno de los tratamientos no invasivos que más eficacia tiene para la solución del envejecimiento de la piel, se basa en la tecnología más moderna para devolver a tu piel la firmeza que ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

La radiofrecuencia nos permite obtener un efecto conocido como “lifting” que reduce la flaccidez de los tejidos y reafirma la piel. La radiofrecuencia calienta gradualmente las capas profundas de la piel incrementando la expresión del colágeno (formación de nuevo colágeno), con lo que la piel se contrae y la flaccidez disminuye (reafirmación cutánea).

Alcanzando los 46° C (temperatura a la que se llega gradualmente y sin provocar quemaduras). Este calentamiento profundo mejora la circulación local, promueve la degradación de tejido adiposo y estimula el drenaje de fluidos y toxinas retenidos en los tejidos.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



Dicho tratamiento está indicado para:

- Rejuvenecer la piel.
- Remodelar el contorno corporal.
- Reducir volumen.
- Combatir la flaccidez.
- Eliminar la celulitis.
- Dar firmeza a los tejidos.

¿Que se consigue?

Un drenaje linfático que favorece la eliminación de líquidos estancados en el tejido adiposo. Un aumento de la circulación que mejora el tejido graso subcutáneo facilitando su eliminación.

La formación de nuevas fibras de colágeno en la piel y en el tejido subcutáneo, dándole firmeza y eliminando la flacidez.

Formación de fibroblastos que refuerzan la estructura de colágeno y rejuvenecen la zona tratada.

El tratamiento se utiliza en todo el cuerpo. En la cara contrae la piel, define el óvalo del rostro, levanta las cejas y el cuello (papada) y remodela el contorno de los ojos. En el cuerpo reduce la flaccidez de los brazos, abdomen, glúteos y piernas a causa de la edad, los embarazos y los cambios bruscos en el peso.

Esta nueva tecnología de Radio Frecuencia Unipolar y Bipolar se aplica de manera personalizada de acuerdo con tu tipo de piel y al área de tratamiento. A pesar de la alta temperatura que pueden alcanzar los tejidos, la aplicación de la radiofrecuencia no resulta molesta ni dolorosa. Antes de empezar, se limpia la zona a tratar y se aplica un gel que facilita el deslizamiento del cabezal y reduce la sensación de calor. Además, el aparato cuenta con un sistema de crioterapia que mantiene frío el cabezal que está en contacto con la piel, disminuyendo así la molestia del calor y evitando el riesgo de quemaduras. Al final de la sesión, se siente es un poco de calor y la piel puede mostrar un ligero enrojecimiento que desaparece con la aplicación de un gel de aloe vera.

Dependiendo de la zona a tratar, la sesión puede durar de 45 a 90 minutos, dependiendo de la zona a tratar y sólo puede repetirse al cabo de 15 días.

MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



Resultados

El resultado se puede apreciar en dos fases: la primera ocurre de manera inmediata al lograrse la contracción del colágeno existente. La segunda se produce paulatinamente con el paso de las semanas y el máximo efecto se logra alrededor tres meses después de iniciado el tratamiento, que es cuando se completa la formación de colágeno nuevo. En este lapso se podrán realizar de una a varias sesiones dependiendo de la piel, la necesidad y la respuesta individual de cada paciente al tratamiento.

Tratamientos faciales: resulta muy efectivo en casos de flacidez y arrugas en cara, cuello y escote, resultando ser una buena alternativa al lifting quirúrgico. Sesiones recomendadas: de 4 a 6. Duración: 90 minutos.

Tratamientos corporales: se obtienen muy buenos resultados en casos de flacidez en brazos, cara interna de muslos, glúteos y abdomen. También resulta muy efectiva en zonas con celulitis y depósitos de grasa localizada. Sesiones recomendadas: entre 6-10. Duración de la sesión: 60 minutos.

Equipo Radiofrecuencia: Evolution 19

Precio: \$6,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Características

Monopolar: 5mm, 15mm, 23mm, 32mm, 40mm

Bipolar: 15mm, 32mm

Densidad Energética: 5 ~ 50J/cm³, 5~100 J/cm³, 5~200 J/cm³, 5~300 J/cm³

Potencia de Salida: 30W - 350W

Modo de Salida: 4 modos

Niveles de Energía: 1~99

Frecuencia: 10MHz

Sistema de Enfriamiento: Agua, Aire y Semiconductor.

Especificación

Aplicador del RF: Mono polar y bipolar

RF de potencia de salida: 30W-350W

Densidad de energía: 5-50J/cm³



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Equipo Radiofrecuencia: Evolution 19

Precio: \$6,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Modo de salida: 8modos

Temperatura ajustable: - 5 a 5°C

Exhibición: exhibición colorida del tacto

Frecuencia de la operación: el 1M, 10M

Fuente de alimentación: el 110V/220V ± 10% 50/60Hz, 12A

Sistema de enfriamiento: Refrigeración por agua, aire a presión y enfriamiento por semiconductor.

Energía de 1MHZ y de 10MHZ RF, así que la máquina incluye RF bipolar y monopolar. Se puede cambiar el handpiece bipolar y monopolar fácilmente en esta máquina cuando usted quiere utilizar cualquier handpiece.

Temperatura de Enfriamiento: -4 ~ 4°C

Alimentación: 220V / 50Hz o 110v / 60Hz

Peso Neto: 20kgs; Peso Total: 32kgs

Tamaño: 590mm × 400mm × 360mm



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA

Equipo Radiofrecuencia: Evolution 19

Precio: \$6,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Aplicaciones:

1. Estiramiento Facial.
2. Desvanecimiento de Arrugas.
3. Mejora la elasticidad de la piel floja.
4. Levantamiento de senos.
5. Mejora el contorno facial.
6. Mejora el contorno corporal.
7. Mejora el contorno de los labios.
8. Reduce la densidad de grasas en el cuerpo.
9. Otras aplicaciones.

Accesorios:

- 2 x Piezas de Mano.
- 1 x Embudo.
- 1 x Llave de Seguridad.
- 1 x Caja y Manuales.
- 1 x Certificado de Garantía.



MAQUINAS RADIOFRECUENCIA



MAQUINAS CAVITACION

¿Qué es cavitacion?

La cavitación se define a partir de la generación controlada y repetida de micro-burbujas de vacío en el interior de un líquido, fluido o material fisiológico, seguido de su propia implosión. Este método se caracteriza por lograr romper las difíciles estructuras de los depósitos grasos localizados. Estas zonas suelen ser resistentes a las dietas de adelgazamiento, dado su carácter de almacenamiento y no son fáciles de eliminar, tampoco, a través del ejercicio o los masajes. La cavitación consigue actuar sobre estas zonas, liberándolas de la grasa. Es un reafirmante muscular y moldeador del cuerpo que obtiene resultados en pocas sesiones.

la destrucción de la célula adiposa con la consiguiente transformación de la grasa en una sustancia líquida (diglicérido) que será eliminada a través del sistema linfático y vías urinarias. Las células grasas se ven expuestas a una sobrepresión, que rompe sus membranas, desencadenando la destrucción de los adipositos. La grasa que contienen –los triglicéridos- se fragmenta en diglicéridos, pudiendo ser éstos últimos expulsados a través de la orina. A través de una emulsificación de la grasa, se consigue cambiar el estado de los depósitos grasos, pasando de sólido a líquido, convirtiéndolos en una sustancia fácil de eliminar mediante la orina. Se aconseja una dieta hipocalórica y la ingesta de al menos dos litros de agua antes y después de cada tratamiento, dado que es una parte imprescindible para poder eliminar la grasa.

Modalidades

Existen algunas variantes dentro del campo de los tratamientos que integran la cavitación en su proceso de acción. Encontramos la cavitación estable, la doble cavitación y la ultracavitación. La primera modalidad es la llamada tradicional que funciona según el esquema explicado anteriormente. Es una alternativa a la liposucción quirúrgica, menos agresiva y más cómoda. Es un tratamiento que reduce la celulitis y los panículos adiposos con muy buenos resultados.

MAQUINAS CAVITACION



La doble cavitación, por otro lado, es el efecto producido por dos ondas de frecuencias distintas y combinadas, generando de forma controlada y repetitiva micro burbujas de gas. Paralelamente estas ondas interactúan generando un elevado aumento de temperatura interna por el efecto de vibración de la resonancia molecular y de la cavitación. El efecto de las burbujas es el aumento de temperatura, dado que acumulan energía, hasta que se colapsan e implosionan. Las células adiposas se exponen a esta energía, y por lo tanto se destruye de forma selectiva la grasa con la consiguiente transformación de la esta sustancia líquida, que después será eliminada a través del sistema linfático y urinario. Si se combina este procedimiento con el endomasaaje, se genera una succión sobre la célula y se produce un estiramiento del tejido, aportando oxigenación a la zona, así como una mejor irrigación sanguínea.

Este tratamiento permite por efecto sonoforético una penetración de los principios activos y enzimas de cosméticos, consiguiendo un aporte muy importante de nutrientes muy beneficiosos para el organismo. Es muy recomendable realizar un drenaje en la zona justo después de la sesión para ayudar a la eliminación. No necesita anestesia y está dotado con la máxima seguridad para el paciente con un diagnóstico y un control previo realizado por el propio aparato. Permite resultados visibles a partir de la tercera sesión y con un efecto duradero. Se trata de un sistema que asegura eficacia y estabilidad a lo largo del tiempo. Por otro lado la ultracavitación incorpora ultrasonidos de baja frecuencia, que logran romper el tejido graso sin dañar la micro circulación. A través de las ondas que propagan vibración de ultrasonidos, se genera una sucesión de burbujas que crean una compresión estable capaz de separar los nódulos grasos, romper la membrana de los adipocitos y emulsionar la grasa que albergan.

Duración

Normalmente los tratamientos duran 35 minutos, que se reparten en un sola área de trabajo: abdomen, glúteos, zona externa o interna de la pierna. En cada sesión, hay una reducción de volumen de unos 2cm. Las sesiones se deben realizar cada 72 horas, tiempo necesario para que el organismo elimine la grasa. Se recomienda realizar entre 6 y 12 sesiones, dependiendo de la zona tratada y del estado del paciente. El mínimo de sesiones recomendadas son de 6 a 10.

Equipo Cavitation: Cavitation Plus Ultra 4

Precio: \$7,500 dolares (con envio incluido a cualquier parte del mundo)

Ultracavitacion +t Tripolar RF + Monopolar RF + Liposuccion al vacio (vaccuum liposuction).

Cuatro Cabezales:

- 1).Monopolar RF head
- 2).Tripolar RF head (one big, one small)
- 3).Ultrasonic cavitation head
- 4).Vacuum liposuction head



MAQUINAS CAVITACION

Equipo Cavitation: Cavitation Plus Ultra 4

Precio: \$7,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Especificación técnica:

Exhibición de TFT LCD pantalla táctil color de 8 pulgadas

Tecnología Cavitation+Vacuum+ RF+Tripolar y monopolar

Frecuencia de la cavitación 40KHz

Energía máxima de la cavitación 100W

RF tripolar 1MHz (frecuencia de la salida); 50 vatios (de potencia de salida

máximo) de RF monopolar 1MHz (frecuencia de la salida);

Presión del vacío de 50 J (de potencia de salida máximo)

Presion al vacio: 1000kpa

Handpieces: 4

1).Monopolar RF

2).Tripolar RF (una grande, una pequeña) manipulo para cavitación

3).Manipulo Ultrasonic para liposuccion

4).Voltaje CA 50/60Hz de 220 ± 10 V AC/ 110 ± 10 V

Tamaño 40cm x 35cm x 40cm (L x W x H)

Peso 15KG



MAQUINAS CAVITACION

Equipo Cavitation: Cavitation Plus Ultra 4

Precio: \$7,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Breve introducción

La cavitación y el equipo de la belleza del RF es el equipo más nuevo que utiliza la tecnología más avanzada. Combina altamente la ventaja de la cavitación y del RF ultrasónicos. El efecto de la cavitación del ultrasonido de las aplicaciones de Ultracavitation para hacer las burbujas de aire alrededor de las membranas del lipocyte romperse para arriba. Los lipocytes quebrados después serán absorbidos y metabolizados fuera de cuerpo humano por el sistema linfático. Tiene un resultado de tratamiento perfecto para la pérdida de peso. Además utilizamos radiofrecuencia de 6 megaciclos para alternar el campo eléctrico en la piel de positivo a la negativa. Producirá la cabeza debajo de dermis entonces la desnaturalización inicial del colágeno. ¡La regeneración subsecuente del colágeno entonces fomenta aprieta el tejido cutáneo y hace la piel que aprieta, lisa y fresca!

Alcance de uso: (1) Ablande el tejido de la grasa dura, rompa para arriba el lipocyte (2) Quite las arrugas, consolide y apriete la piel (3) Pele el rejuvenecimiento (4) El formar del cuerpo

Caracteres: 1. El diseño único disfruta de la patente nacional, dos puntas de prueba del tratamiento 2. Adopte la lipolisis ultrasónica de la tecnología marginal en el mundo hoy 3. Conveniente a todas las clases de piel y de gente 4. Cómodo, ningun dolor, ninguna cicatriz en el tratamiento 5. Fácil funcionar 6. Tratamiento rápido, no vida normal de la gente del afecto



MAQUINAS CAVITACION

Equipo Cavitation: Cavitation Plus Ultra 4

Precio: \$7,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)



Tripolar



Vacio



Unipolar RF



Tripolar RF (6 mm)



Tripolar



MAQUINAS CAVITACION

Evolution 25: Equipo IPL + Elight + RF + Cavitacion

Precio: \$18,500 dolares (con envío incluido a cualquier parte del mundo)

Lo mas avanzado en el mercado con todas las funciones existentes en un solo equipo!

Evolution 25 puede utilizar 4 tipos de manipululos. El software puede identificar automáticamente cada manipulo. Usted puede realizar las cuatro funciones: IPL, Elight, RF y Cavitacion.

Manipulo Elight (RF y IPL):

Tamaño de punto: 12*30m m o 12*45m m

Energía del IPL: 10~50 J/cm²

Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m

Frecuencia del RF: 1mhz Energía del RF: 1~100 J/cm³

Nivel del RF: 1-8 nivel

Manipulo IPL (Luz Pulsada):

Tamaño de punto: 8*40m m o 12*40m m o 15*35m m o 15*50 m m

Longitud de onda del IPL: 430,530.560.585.640m m

Energía: 10~50 J/cm²

Duración del pulso: 2~20ms

Secuencia del pulso: 1~20 pulsos

Tiempo de retardo del pulso: ms 5~50

Enfriamiento integrado de la piel: -4~ 0

Fuente eléctrica: 220V/50Hz o 110V 60Hz

Manipulo RF

(Radiofrecuencia):

Manipulo de RF o

monopolar multipolar

RF 1mhz o 10mhz

Energía del RF: 1~100 J/cm³

Nivel del RF: 1-8 nivel

Cabezal de Cavitacion

1MHZ+40K



MAQUINAS CAVITACION